

2023年4月作成
(第1版)

Nasal Wash

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください

届出番号 04B2X00009001011
機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 家庭用鼻腔洗浄器(JMDNコード 71122001)
ハナノア



形状・構造及び原理等




使用方法等

1.器具に液を入れる

目盛り線(20mL 両鼻分)を目安に洗浄液を入れ、ノズルをつけてください

2.液を鼻の中に流し込む

ノズルの「うえ」の文字が読める向きに洗浄器具を持ち、鼻の穴にフィットさせてください
図のように正面を向き、洗浄器具の中央部を押して洗浄液を鼻の中に流し込んでください

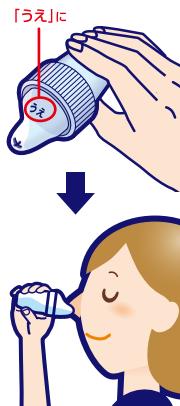

3.洗浄液を吐き出す

口に流れ込んだ洗浄液を吐き出してください
※洗浄液は口だけでなく、鼻の穴からも出ることがあります
※鼻から出すことでも洗浄効果はあります
※液漏れのおそれがあるため、液を流し込む際、器具を強く押しすぎないこと

4.洗浄液を最後まで使い切る

20mLを使い切るまで、左右の鼻の穴を交互に洗浄してください
●1日1~3回を目安に使用してください

●上手に洗うポイント

「ア」と声を出しながら流し込むと、耳の奥に洗浄液が流れにくくなり、無理なく鼻うがいができます

●使用方法に関する注意

(1)上を向いて使用しないでください
また洗浄後、強く鼻をかまないでください[耳の内部に洗浄液が入り、中耳炎になる恐れがある](2)鼻から吸い込まずに自然に流し込んでください[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがある]
(3)洗浄液が鼻や口から流れ落ちますので、洗面台等で使用することをおすすめします(4)洗浄液を勢いよく流し込んだり、鼻から洗浄液を強く吸い込むと、鼻に痛みを感じる場合があります



効果

鼻の奥に入り込んだ雑菌や花粉、ほこり等を洗い流します

使用上の注意

- (1)15才未満の小児には使用させないこと
- (2)嚥下障害がある方(食べ物や飲み物を飲み込みにくい方)は使用しないこと[洗浄液が気管支や肺に入る恐れがある]
- (3)耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること
- (4)洗浄後、強く鼻をかまないこと
- (5)鼻の洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないこと
- (6)鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと
- (7)目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合は、こすらずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残る場合はこの箱を持って医師に相談すること
- (8)洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り1日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合は、この箱を持って医師に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)お子様の手の届かない所に保管すること
- (2)直射日光、高温多湿の場所を避け、冷暗所に密栓して保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと
[誤用の原因になったり、品質が変わることがある]
- (4)使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないこと

保守・点検に係る事項

- (1)使用後はノズルを外して洗浄器具をよく洗って乾かし、清潔な場所で保管してください
- (2)熱湯での洗浄、ドライヤー等高温での乾燥はしないでください[変形の恐れがある]
- (3)洗剤等は使わず水だけで洗ってください[破損の恐れがある]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元：製造元
仙台小林製薬株式会社

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-06
9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

洗浄器具:1個 ハナノア専用洗浄液
成分:精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na
内容量:500mL