

鼻腔でも唾液でも測れる 2WAY検査キット

小林製薬のコロナウイルス抗原検査キット

エスプライン® SARS-CoV-2 N(一般用)

エスプラインは富士レビオ株式会社の登録商標です。

キットの内容
検体採取方法

販売名 エスプライン SARS-CoV-2 N(一般用)

第1類医薬品

一般用検査薬



*使用者向け使用の手引きより、内容を抜粋しています。ご使用前に添付文書を必ずご確認ください。

- 検査結果から自分で病気の診断をすることはできません。
(添付文書内に記載の「新型コロナウイルス抗原検査の使用について」に従ってください。)
- 検査結果が「陽性」の場合は適切に医療機関の受診等を行ってください。
- 検査結果が「陰性」であっても症状がある場合には、適切に医療機関の受診等を行ってください。



使用方法は
こちらの2次元コードより
動画でもご確認ください。

キットの内容 2回分が入っています



【内容】検査キット 2回分

- | | |
|------------------|----|
| ●反応カセット | 2個 |
| ●検体処理液(スクイズチューブ) | 2個 |
| ●滅菌綿棒 | 2本 |
| ●滴下チップ | 2個 |
| ●唾液検体採取用滅菌済み容器 | 2個 |

検体の採取方法 鼻腔からと唾液から。選べる2パターン!

鼻腔から 採取する場合

- ①キット付属の滅菌綿棒を、
鼻孔入り口から**2cm程度**、ゆっくり挿入します。 **2cm程度**
- ②滅菌綿棒を**5回程度ゆっくり回転**させます。
- ③**5秒程度静置**し、そっと引き抜きます。



唾液から 採取する場合

***注意事項**
唾液採取の**30分前から**、飲食、喫煙、歯磨き、
口内洗浄等はお控えください。

- ①唾液検体採取用滅菌済み容器(袋)に**1mL程度**の
唾液を採取します。(袋の下から**1.5cm程度**)
- ②キット付属の滅菌綿棒を唾液検体採取用滅菌済み容器(袋)に浸し、
滅菌綿棒を**5回程度回転**させ、綿球の全体に染み込ませます。



鼻腔でも唾液でも測れる 2WAY検査キット

小林製薬のコロナウイルス抗原検査キット


エスプライン® SARS-CoV-2 N(一般用)

エスプラインは富士レビオ株式会社の登録商標です。

販売名 エスプライン SARS-CoV-2 N(一般用)

第1類医薬品

一般用検査薬

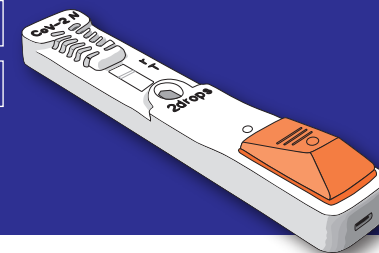

操作・判定方法

検体処理液、反応カセットはアルミ袋のままで、20～37℃に戻してから使用ください。

検体の処理方法

スクイズチューブを軽く振って、トップシールに付着した検体処理液を落としてから始めてください。

① トップシールをはがす。



② 綿棒をスクイズチューブに浸し検体を抽出し、綿棒を取り出す。



1. スクイズチューブの外側から綿棒を挟みもみながら、綿棒を10回程度回転させる。
2. その後、スクイズチューブを押さえて綿棒から液を搾り出しながら綿棒を取り出す。

・ビニール手袋の装着は必須ではありません。

③ スクイズチューブに滴下チップをはめる。




④ 1cm以上、上から、検体滴下部に2滴、滴下する。



注意！
1. 検体滴下部外にこぼさない。
2. 検体滴下部に近づけすぎない。

⑤ オレンジ色のボタンを押す。
20分後に判定。

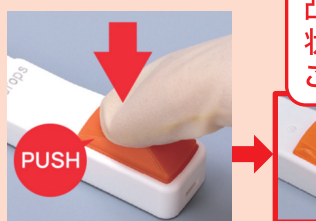

凸部が凹んだ状態になったことを確認！

20～37℃で20分間水平に静置し、反応を行います。

判定方法

レファレンスライン(rライン)が青く発色することで、反応が正常に行われたことを確認することができます。

*示した写真は判定例です。



20分後

●20分で判定を実施してください。
20分判定時点では「陰性」でその後「陽性」となった場合は、「陰性」と判定してください。

■判定例 r:レファレンスライン T:判定ライン

陽性



T(判定)のところにラインが出現。

陰性



rのところのみにラインが出現。

再検査



① T(判定)のところのみにラインが出現。



② 反応前の状態。(ラインピンク)

本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。使用後の綿棒等は感染性を有するおそれがありますので、廃棄時の取扱いには十分注意し、使用したキット(綿棒、チューブ等を含む)をごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。

*使用者向け使用の手引きより、内容を抜粋しています。
*ご使用前に添付文書を必ずご確認ください。