

医療機器届出番号
28B3X10011000043
医04 整形用品 一般医療機器
家庭用温熱パック
JMDNコード71019000

販売名

桐灰めぐラボ 手の温熱ホルダー

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

製品特徴

- レイノー現象や冷えなどの血行不良を緩和する温熱ホルダーです。
- 製品使用中でも、自由に両手が使えます。
- 約48℃の温熱で血行を促します。※
- 温熱効果が約8時間持続します。
- ※専用ホルダー内で使用した場合の温度

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. 肌に直接あてない

3. 次の方は使用しない


- ①自らの意思ですぐに取り外せない方
- ②手や足に神経障がいのある方[①②重度のやけどになることがある]

4. 次の部位には使用しない

- ①粘膜、顔(目のまわり)[重度のやけどになることがある]
- ②湿疹・かぶれ
- ③傷口
- ④打撲・ねんざ[②～④症状が悪化することがある]

【形状・構造及び原理等】

鉄の酸化反応による発熱で患部を温める

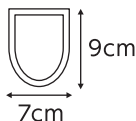

【使用目的又は効果】

使用目的：温熱治療

効果：温熱効果・筋肉のこりをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・疲労回復・胃腸の働きを活発にする

【使用方法等】

- ①使用直前に個包装から専用温熱シートを取り出す。
- ②フィルム面を肌側にして、もまずに専用ホルダーのポケットに入れる。
- ③専用ホルダーを装着する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

④8時間使用後はすぐに取り外す。[低温やけどのおそれがある]・必ず、1時間に1回程度装着部位の肌の状態を確認する。・就寝時やふとんの中で使用しない。・コタツや電気カーペットその他暖房器具と併用しない。・熱いと感じたときに、すぐに取り外せない状態での使用はさける。・運動時には使用しない。・本品を使用した状態で、上から押さえてついたり、過度な圧迫をしない。・使用は1日1回を限度とする。・装着位置がずれると、適正な機能が得られない場合がある。・つけ心地が悪い場合は、つけ直す。

Disposable Heating Pad with
Dedicated Holder

2023年1月(第1版)

再使用禁止

【使用上の注意】

- 1. 使用注意(次の方は慎重に使用すること)
- ①皮フの弱い方[やけど、かぶれになりやすい]
- ②高齢者[生理機能が低下していることが多く、やけどとすることがある]
- 2. 重要な基本的注意
- 1) 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談する。①今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある方 ②糖尿病など、温感や血行に障がいをお持ちの方 ③貼り薬や塗り薬を使用する方 ④妊娠中の方 ⑤医師の治療を受けている方 2) 肌に赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状がでた場合はすぐに使用を中止し、医師に相談する。3) 使用中の注意事項 ①低温やけど防止のための注意 低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水泡等の症状をおこすやけどをいう。なお、自覚症状をとまなわないで低温やけどになる場合もあるので注意する。②熱いと感じたときや異常が認められる場合は、すぐに取り外す。③患部の症状が悪化した場合はすぐに使用を中止し、医師に相談する。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光をさけ、涼しい所に保管する。・小児の手の届かない所に保管する。・保存状態により、表示の発熱時間に影響を与えることがある。

【取扱い上の注意】

・保温性の高い衣類を着る場合は、熱くなりすぎることがある。・食べられないので口に入れない。間違って飲み込んだときは、うがいをして医師の診断を受ける。・目に入った場合はこすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受ける。・捨てるときは、市区町村で定める区分に従う。・有効期限内に使用する。・使用目的以外に使用しない。

△やけど、低温やけど防止のための注意

・肌に直接あてず、必ず専用ホルダーのポケットに入れて使用する。・必ず、1時間に1回程度装着部位の肌の状態を確認する。・過度に圧迫した状態で使用しない。・就寝時やふとんの中で使用しない。・糖尿病など、温感および血行に障がいのある方は使用しない。

A4判の添付文書が必要な方はお客様相談室までご連絡ください。

▼あつらいいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-35

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

桐灰小林製薬株式会社

〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-9

温熱シート：MADE IN JAPAN

ホルダー：MADE IN CHINA