

医04 整形用品 一般医療機器
家庭用温熱パッド JMDNコード 71019000

販売名:肩腰ホットンb

Heat Pad for Shoulder and
Back Pain while Sleeping

再使用禁止

貼り方のコツ


腰

腰にフィットする
肌着に貼る



肩

首もとが詰まった
肌着に貼る

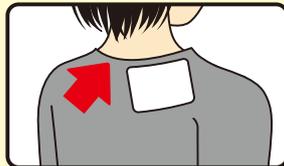

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【禁忌・禁止】

1.再使用禁止

2.肌に直接貼らない


3.次の方は使用しない

①自らの意思ですぐにはがせない方 ②糖尿病など、
温感や血行に障がいのある方 [①②重度のやけどに
なることがある]

4.次の部位には使用しない

①粘膜、顔(目のまわりなど) [重度のやけどになるこ
とがある] ②湿疹・かぶれ ③傷口 ④打撲・ねん
ざ [②~④症状が悪化することがある]

【形状・構造及び原理等】

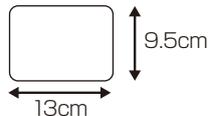

鉄の酸化反応による
発熱で患部を温める

【使用目的又は効果】

使用目的: 温熱治療

効果 : 温熱効果 ・筋肉のこりをほぐす ・神経痛、筋肉
痛の痛みの緩解 ・血行をよくする ・筋肉の疲
れをとる ・疲労回復 ・胃腸の働きを活発にする

【使用方法等】

使用直前に個包装から温熱シートを取り出し、はく離シ
ートをはがして、肌に直接触れないよう、もまずに肌着に貼る。

<使用方法等に関する使用上の注意>

・本品を使用した状態でさらに上から押さえつけたり、長時間
圧迫しない。・コタツ、電気カーペット、電気毛布、湯たんぽ、電
気アンカ等その他の暖房器具と併用しない。・熱いと感じた
ときに、すぐにはがせない状態での使用はさける。・運動時には
使用しない。・厚みのある肌着を着用すると、温かさが感じら
れない場合がある。・肩に使用する際は、肌着の種類によ
っては、温熱シートが患部に当たらない場合がある。首もとが
詰まった肌着を着用して使用する。温熱シートの発熱が
終了したらすぐにはがす。[低温やけどのおそれがある]

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の方は慎重に使用すること)

①皮フの弱い方 [やけどになりやすい] ②高齢者 [生理
機能が低下していることが多く、やけどすることがある]

2. 重要な基本的注意

1) 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談する。

①今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例え
ば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがあ
る方 ②貼り薬や塗り薬を使用する方 ③妊娠中の方

2) 肌に赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状がでたとき
はすぐに使用を中止し、皮フ科医等に相談する。

3) 使用中の注意事項

①低温やけど防止のための注意 低温やけどは、体温
より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水
疱等の症状をおこすやけどをいう。なお、自覚症状をと
もなわないで低温やけどになる場合もあるので注意す
る。②熱いと感じたときや異常が認められる場合は、す
ぐにはがす。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光をさけ、涼しい所に保管する。

・小児の手の届かない所に保管する。

【取扱い上の注意】

・保存状態により、表示の発熱時間に影響を与えることが
ある。・粘着剤で傷む肌着や高級な肌着には使用しない。
・温熱シートをはがすときは、不織布部をつままずに粘着
剤のない部分に指を入れてゆっくりとはがす。(貼りなお
すと粘着力が低下する。)・食べられないので口に入れ
ない。間違えて飲み込んだときは、うがいをして医師の診
断を受ける。・目に入った場合はこすらずすぐに流水で15
分以上洗い流し、医師の診断を受ける。・捨てるときは、市
区町村で定める区分に従う。・有効期間内に使用する。使
用目的以外に使用しない。

MADE IN JAPAN

あつたらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-35

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元

桐灰小林製薬株式会社

〒669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-9